



**program do komunikacji
alternatywnej i wspomagającej**

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

www.mowik.pl
www.mowik.sklep.pl
<http://www.youtube.com/user/MowikAAC>

I. Umowa licencyjna programu GADAczek

1. Przedmiotem niniejszej licencji jest program GADAczek przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z komunikacją werbalną, dalej nazywany programem oraz wszelkie materiały dołączone do programu takie jak instrukcja.
2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do nieautoryzowanego powielania programu, materiałów do niego dołączonych, znaków graficznych rozpowszechniania oraz umieszczania programu ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach publicznych.
3. Użytkownik nie może tworzyć produktów pochodnych na podstawie tego programu lub jego części.
4. Użytkownik programu zobowiązuje się do nie podejmowania prób odtworzenia kodu źródłowego w celu jego pozyskania przez użytkownika.
5. Program i dołączone do niego materiały drukowane oraz umieszczone na stronie internetowej mowik.pl, mowik.sklep.pl są chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami własności intelektualnej.
6. Licencjodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z programu GADAczek i materiałów towarzyszących.
7. Program stanowi własność Licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
8. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkodę będącą następstwem używania bądź niemożności używania programu. Licencjodawca nie gwarantuje, że program w pełni spełni wymagania Użytkownika, lub że program jest pozbawiony błędów oraz nie gwarantuje, że program będzie działał bez przeszkód.
9. Naruszenie przez Użytkownika obowiązków wynikających z niniejszej licencji skutkować będzie rozwiązaniem umowy.
10. Naprawienie szkody licencjodawcy z racji nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień licencji nastąpi na zasadach ogólnych.

II. Ostrzeżenie przed epilepsją

Zanim uruchomisz ten program lub pozwolisz to zrobić swoim podopiecznym, przeczytaj to ostrzeżenie!

Niektóre osoby wystawione na działanie specyficznie migających światła lub powtarzających się rozbłysków narażone są na napady epilepsji lub utratę przytomności. Może to ujawniać się również u nich podczas oglądania telewizji lub grania w niektóre gry komputerowe, nawet jeśli osoba taka nigdy wcześniej nie miała napadów padaczkowych. Jeśli zaobserwujesz u siebie lub u swojego podopiecznego podczas używania programu któreś z tych objawów: mdłość, zaburzenia widzenia, niekontrolowane ruchy oczu lub migotanie, utrata przytomności, dezorientacja, konwulsje, NIEZWŁOCZNIE przerwij użycie programu i skonsultuj się z lekarzem.

III. Wymagania systemowe/sprzętowe


1. Telefon lub tablet z systemem Android 2.3 lub nowszym
2. Procesor: minimum 1 GHz

IV. Instalacja programu.

Program instaluje si poprzez Android Market lub Google Play. www.play.google.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dicosc.stepmowik&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5kaWNvc2Muc3RlcG1vd2IrlIIO.

V. Instrukcja obslugi.

1. Okno programu – opis.

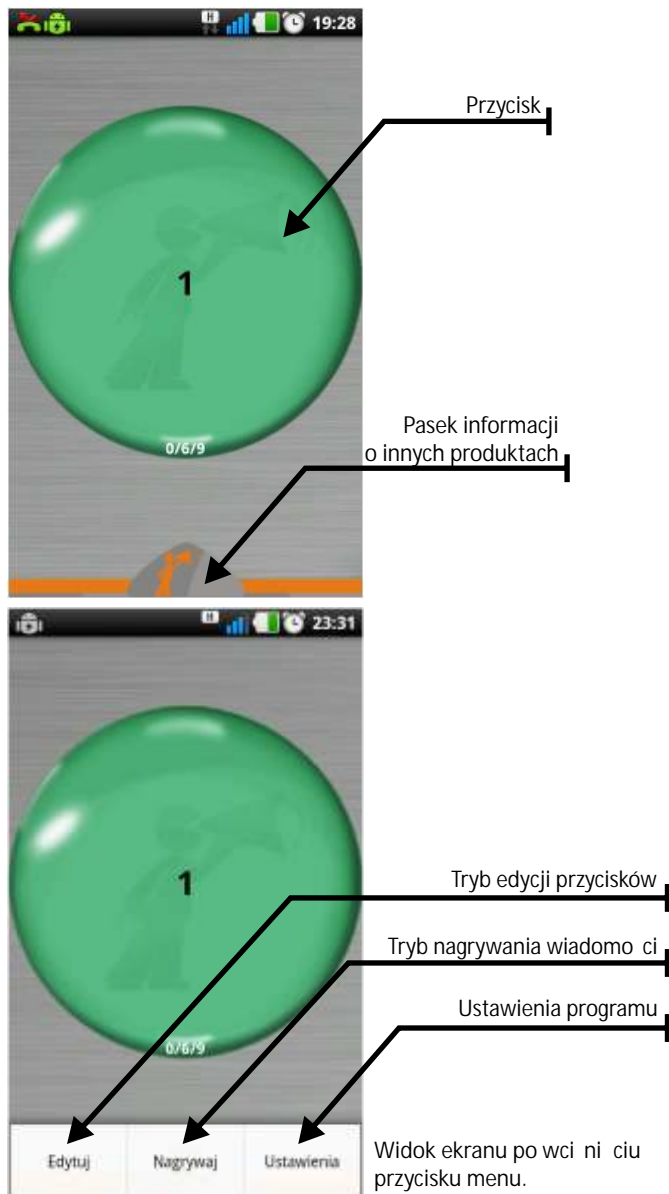

2. Ustawienia programu.
Wcinij przycisk menu a nastąpi ustawienia.



2.1 Układ przycisków

Masz do wyboru 6 różnych układów przycisków:

- 1 przycisk z 9 nagraniami
- 2 przyciski z 4 nagraniami w przycisku
- 3 przyciski z 3 nagraniami w przycisku
- 4 przyciski z 2 nagraniami w przycisku
- 6 przycisków z 1 nagraniem w przycisku
- 9 przycisków z 1 nagraniem w przycisku

Przy zmianie układu nastąpi wykasowanie wiadomości nagranych.

2.2 Dźwięki

Możesz ustawić głośność odtwarzania nagranych wiadomości.

2.3 Aktualizacje

Sprawdź i zainstaluj najnowszą wersję programu.

2.4 Zabezpieczenie

Możesz ustawić hasło w celu zabezpieczenia trybu edycji.

3. Edycja przycisków.

Wciśnij przycisk menu na urządzeniu a następnie Edytuj.



Masz możliwość ustawienia koloru przycisku, zastosowania koloru do wszystkich przycisków, wyboru indywidualnej grafiki do każdego przycisku (z pakietu symboli MÓWiK, zdjęcia, własnej grafiki). W trybie Edycji masz możliwość skasowania nagranych wiadomości. Aby wyjść z trybu edycji wciśnij przycisk cofnij na urządzeniu lub menu i zakończ edycję.

4. Nagrywanie wiadomości.

Aby wejść w tryb nagrywania wciśnij Menu a następnie Nagrywaj.

W trybie nagrywania na przycisku / przyciskach widoczne są zielone mikrofony.






Po naci ni ciu przycisku nast puje rozpocz cie nagrania – mikrofon w tym czasie zmienia kolor na czerwono.

Cyfry informuj o:

1. Numerze nagrania
2. Ilo ci nagra
3. Maksymalnej ilo ci nagra

Aby zako czy nagrywanie wiadomo ci wci nij ponownie przycisk.
Mo esz skasowa wiadomo nagan , odsłucha nagranie , zapisa .

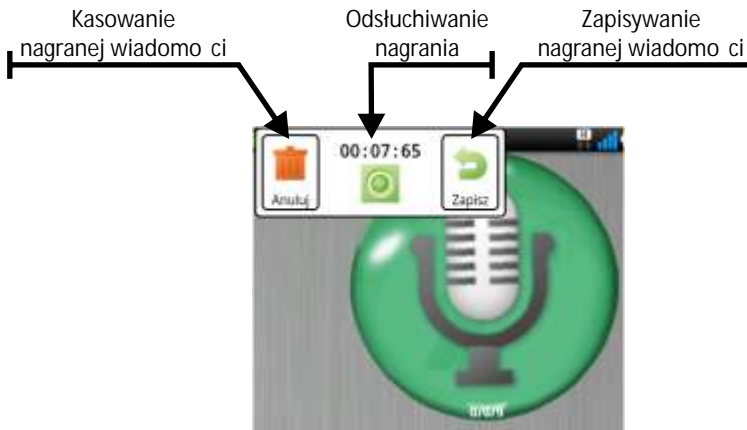

Po zapisaniu 1 wiadomo ci pod przyciskiem mo esz nagra analogicznie kolejne wiadomo ci do osi gni cia maksymalnej ilo ci nagra pod danym przyciskiem.

Aby wyj z trybu nagrywania wci nij wstecz.

Mo esz rozpocz korzystanie z nagranych wiadomo ci. Je eli w trakcie nagrywania lub odtwarzania wiadomo ci wyst pi bł d lub program „zawiesi si ”- wył cz program i uruchom ponownie.

VII. Pomoc

Pomoc techniczna, uwagi dotyczące działania programu: pomoc@mowik.pl lub formularz kontaktowy na stronie mowik.pl w zakładce Kontakt.

Dodatkowe informacje, instrukcje, filmy instruktażowe znajdziesz na naszych stronach: www.mowik.pl

<http://www.youtube.com/user/MowikAAC>

Wdzięczamy udanej i satysfakcjonującej komunikacji za pomoc GADAczka
Zespół MÓWika