

MÓW^{ik}[®] NEWSLETTER

Nr 2 (2) październik 2021 Kraków



Szanowni Państwo,



oddajemy na Państwa ekrany kolejny MÓWikowy Biuletyn. Rozpoczynanie przygody z komunikatorem na początku może wydawać się dość skomplikowane. Zdajemy sobie sprawę, że może on mieć ogromną moc, jednak nie zawsze wiemy, jak dobrze korzystać ze sprzętu, aby efekty były jak najlepsze. Dlatego dzisiaj - jak zwykle zwięźle i praktycznie - piszemy o przygotowaniu tabletu do komunikacji tak, aby nie służył jedynie zabawie, lecz porozumiewaniu się z otoczeniem. W numerze znajdziecie Państwo także kilka wskazówek na to, jak usprawnić korzystanie z tabletu z oprogramowaniem wszędzie tam, gdzie znajduje się Użytkownik AAC. Ponadto kontynuacja tematu związanego z zakupami na niepolskojęzycznych portalach sprzedażowych. Jak to zrobić szybko i skutecznie pisze Kasia Kordella. Miłej lektury!

W dzisiejszym numerze:

WRZESIEŃ 2021

- s. 3** Dlaczego tablet z komunikatorem to nie to samo, co tablet do "grania"?
Elżbieta Ślusarczyk
- s. 4** Jak usprawnić sobie korzystanie z tabletu z MÓWikiem na co dzień?
Elżbieta Ślusarczyk
- s. 6** Szybkie i sprawne zakupy na Aliexpress
Katarzyna Kordella

MÓWik®
NEWSLETTER

MIESIĘCZNIK

Redaktor naczelna: Elżbieta Ślusarczyk
Sekretarz redakcji: Anna Płatek
Projekt graficzny: Renata Płatek

Adres redakcji:
DICO
30-305 Kraków
ul. Edmunda Wasilewskiego 20/3
Kontakt:
newsletter@mowik.pl



Dlaczego tablet z komunikatorem TO NIE TO SAMO, co tablet do "grania"?

Elżbieta Ślusarczyk

Kiedy osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi otrzymuje tablet z oprogramowaniem do komunikacji, np. MÓWik to ten sam tablet przestaje już pełnić swoją główną funkcję dla oglądania YouTube, grania w gry, czy innych rozrywkowych aktywności. Staje się bowiem głosem osoby niemówiącej.

Szczególnie ważne jest, aby zwrócić na to uwagę na początku pracy oraz u dzieci, które zwykle spędzały sporo czasu przed ekranem oglądając filmy na YT, niejednokrotnie będące np. formą autostymulacji.

Komunikator to coś, co pozwala wyrażać siebie, swoje myśli, wspomaga budowanie autonomii i niezależności użytkownika AAC.. Zależy nam zatem na tym, aby możliwość wyrażania siebie nie była zakłócana przez inne rzeczy.

Co zatem warto robić?

Nie ma nic złego w tym, że dziecko ogląda ulubioną bajeczkę na tablecie. Jeśli jednak korzysta z komunikatora to warto wówczas mieć dwa urządzenia - jedno jako komunikator, a drugie jako tablet do oglądania bajek,

grania, czy robienia i przeglądania zdjęć.

Dziecko komunikatorem może poprosić o drugi tablet, na którym będzie mogło się bawić.



Blokada KIDS Place


Kolejnym ważnym elementem jest założenie blokady rodzicielskiej. Z programem MÓWik bardzo dobrze współpracuje Kids Place. Aplikację można pobrać w sklepie Google'a. Po zainstalowaniu i włączeniu blokady rodzic ma możliwość stworzyć na urządzeniu dodatkowy pulpit dla dziecka, który będzie zawierał tylko aplikacje przez niego dozwolone, w naszym wypadku to będzie MÓWik. Jest to pewnego rodzaju panel administratora pozwalający na zarządzanie w zasadzie każdą aplikacją

czy usługą. Dostęp do profilu jest chroniony kodem PIN. Gdyby zdarzyła się sytuacja utraty dostępu do konta możemy go odzyskać za pomocą e-mail. Jeśli na tablecie z MÓWikiem założona zostanie blokada wówczas każdorazowa próba wyjścia, czy wyłączenia programu, włączenia czegoś innego będzie z powrotem przekierowywał do komunikatora. Warto zatem skorzystać z blokady, zwłaszcza, gdy dotychczas tablet był kojarzony głównie z wolnym czasem czy rozrywką.

JAK USPRAWNIĆ SOBIE KORZYSTANIE Z TABLETU z MÓWikiem na co dzień?

Elżbieta Ślusarczyk

Warunkiem powodzenia korzystania z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, a co za tym idzie także z MÓWika jest korzystanie i możliwość dostępu użytkownika do programu wszędzie i każdej porze dnia, a nawet nocy.

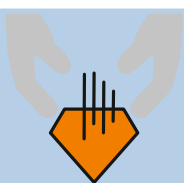



Tak, tablet z MÓWikiem powinien być wszędzie tam, gdzie jego użytkownik. Stąd też piszemy i przypominamy, że tablet warto zabezpieczyć specjalną obudową, szkłem ochronnym.



Co jeszcze może się przydać?

Pasek lub rączka


Pasek dołączony do obudowy może znacznie usprawnić przemieszczanie się z tabletem. Daje możliwość przewieszenia przez ramię i zabrania sprzętu na plac zabaw, czy zakupy. Pasek może być dołączony do obudowy. Jeśli obudowa nie ma swojego paska, warto poszukać pasków, np. z torby sportowej i zamontować go na specjalnych karabinkach, które możesz znaleźć w sklepie sportowym. Dla innych bardziej przydatna może być obudowa z rączką, a innym znacznie usprawni korzystanie z MÓWika możliwość podparcia go podczas rozmowy. Zachęcam do zajrzenia po naszym przewodniku po etui w poprzednim newsletterze.

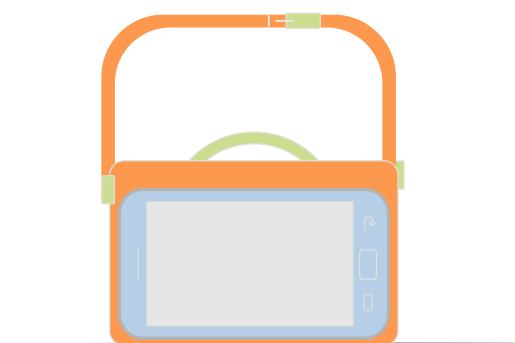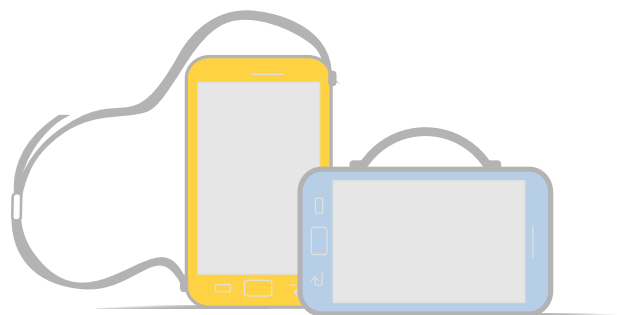

Specjalna torba

Być może dla Twojego dziecka bardziej funkcjonalna okaże się specjalna torba do przenoszenia sprzętu. Możesz ją uszyć sam, dostosowując do potrzeb i możliwości dziecka. Być może materiałowa torba z folią wszytą w miejsce, gdzie będzie znajdować się ekran tabletu będzie świetnym rozwiązaniem.

Wielkość tabletu

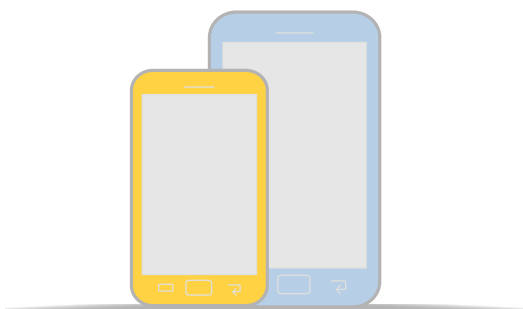

Przy wyborze tabletu weź pod uwagę jego rozmiar, tak by był on łatwy do przenoszenia i posługiwania się dla Twojego dziecka.

Komunikator ma pozwolić dziecku na sprawne i szybkie porozumiewanie się. Warto zatem skonsultować ze specjalistą czy terapeutą dziecka, jaki rozmiar byłby najbardziej optymalny do tego, aby korzystać z MÓWika każdego dnia, w każdym miejscu, tak by było to jak najbardziej wygodne i funkcjonalne.

Podpisz tablet



To nie jest zwykły tablet.
To **MÓWIK** zastępujący mowę niemówiącej osobie.
W razie znalezienia, bardzo proszę o kontakt:
Oddajesz mi głos. Dziękuję!

Tak, w razie zgubienia warto napisać notatkę, że to nie jest zwykły tablet, że służy do komunikacji dziecka z otoczeniem. Podaj nr telefonu i poproś o zwrot. Taką notatkę możesz umieścić pod lub na obudowie. Także na tablecie. Najlepiej wybrać, np. niezmywalny długopis/ pisak.

Powyższe elementy mogą znacznie usprawnić codzienne funkcjonowanie z komunikatorem, który staje się głosem dziecka. Zatem głos ten powinien być dostępny i używany wszędzie tam, gdzie jest jego użytkownik. Wybierz

odpowiednie zabezpieczenia i nie bój się zabierać sprzętu na plac zabaw, basen, do szkoły, w góry i nad morze. Wszędzie tam, gdzie jesteście.



SZYBKIE I SPRAWNE zakupy na Aliexpress

Katarzyna Kordella

Piszemy o tym, jak zrobić zakupy na tym portalu ze względu na niejednokrotne głosy i prośby o pomoc w tym temacie.

Jest to miejsce często polecane przez Rodziców Rodzicom, stąd pomysł Kasi Kordelli, aby przybliżyć Państwu tajniki zakupowe, tak by każdy samodzielnie mógł skorzystać ze sklepu. Jak często Państwo wspominają można tu znaleźć sporo ciekawych rozwiązań technologicznych, zwłaszcza jeśli idzie o rozmaite obudowy, paski i inne

zabezpieczenia tabletu.

Z rozmów z Państwem wynika także, że wiele osób rezygnuje z zakupów na Aliexpress, bo zwyczajnie nie wie, jak go obsłużyć. Wystarczy jednak założyć konto i działać. Opisujemy to w kilku prostych krokach.

KROK PIERWSZY

- ZAKŁADANIE KONTA

Otwieramy stronę <https://pl.aliexpress.com/> i klikamy dołącz lub konto.

KROK DRUGI

- REJESTRACJA

wybieramy rejestrację automatyczną za pomocą konta na Facebooku, Google, Twitterze lub na opcję zarejestruj się za pomocą emaila.

KROK TRZECI

- ZAŁOŻENIE KONTA

to wpisanie swojego adres email oraz ustalenie hasła do konta. Po tej czynności wyskoczy weryfikacja email poprzez wpisanie wysłanego PINu na podany adres email. Kod PIN wpisujemy w rubryczki i klikamy - zweryfikuj adres email. Konto zostało założone.

KROK CZWARTY

to ustalenie waluty,

w której będziemy dokonywać płatności. W Polsce to oczywiście złotówki.

KROK PIĄTY

- WYSZUKUJEMY PRODUKT

U góry w zaznaczonym miejscu jest wyszukiwarka, gdzie można wpisywać nazwy w języku polskim.

KROK SZÓSTY

- KLIKAMY W WYBRANE ZDJĘCIE

Zaznaczamy skąd ma być wysłana przesyłka (Chiny lub USA). Po dokonaniu wyboru kraju, następuje wybór rodzaju wysyłki wraz z cenami. Wybieramy też ilość sztuk oraz kolor.

KOLEJNYM KROKIEM

jest **kliknięcie KUP TERAZ**

oraz uzupełnienie danych do wysyłki. Przy kolejnych zakupach już nie trzeba tego robić.

W SIÓDMYM KROKU

- METODA PŁATNOŚCI

należy wybrać metody płatności. Jest kilka do wyboru.

OSTATNI KROK

TO ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA,

które przekieruje nas na stronę wybranej płatności po zaakceptowaniu transakcji. Voilr twój pierwszy zakup na aliexpress został dokonany. Gratulacje!



MÓWikowa

Instrukcja obsługi

W NASTĘPNYM NUMERZE:

- Wsparcie wizualne. By lepiej zrozumieć świat. - Elżbieta Ślusarczyk

Dzienniki Wydarzeń. Dlaczego warto?
- Elżbieta Dawidek

Filary udanego wprowadzania MÓWika
cz.1 Nie kuś! - Ewa Grzelak

ZAPRASZAMY DO SUBSKRYBOWANIA



Pomoc dydaktyczna
do nauki budowania zdań



INFOLINIA +48 535 500 717